



BRANCARD FRANCO GARDA
SYSTEME DE PORTAGE
Manuel d'utilisation

MU PPFG014 éd. 01-2015



SYSTEME DE PORTAGE
MANUEL D'UTILISATION



TSL RESCUE - 9, rue du Pré Faucon - PAE les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX (France)
tél. : +33 (0)4 50 02 80 29 - fax : +33 (0)4 50 01 28 97 - Mail : info@tslrescue.com - www.tslrescue.com



BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation

1/ INTRODUCTION :	3
2/ AVERTISSEMENT :	3
3/ MONTAGE DES BRAS DE PORTAGE SUR LE BRANCARD	4
4/ UTILISATION DU PORTAGE:	6
5/ PORTAGE DU BRANCARD SUR LE DOS :	7
6/ CONTACT :	8





BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation

1/ Introduction :

Le système de portage permet le transport d'un patient dans le brancard Franco Garda par deux personnes. Les harnais ergonomiques permettent une répartition des efforts entre les épaules et les hanches.

2/ Avertissement :

Ce manuel d'utilisation ne concerne que le système de portage adaptable sur le brancard Franco Garda. Pour tout renseignement sur l'utilisation du brancard Franco Garda, reportez-vous à son mode d'emploi.

Lors de l'utilisation du brancard Franco Garda et de ses accessoires, la sécurité des secouristes et des patients dépend de la bonne utilisation qui en est faite. **Toutes les personnes l'utilisant doivent avoir auparavant pris connaissance du manuel d'utilisation et avoir effectué des exercices pratiques avant de partir en opération.**

Les harnais de portage ne sont pas des Eléments de Protection Individuelle. Ils ne doivent pas servir d'amarrage pour treuiller le brancard ou les porteurs. Ils ne doivent jamais servir pour une autre utilisation que le portage du brancard Franco Garda.

Si vous avez des demandes concernant une utilisation particulière du système de portage, contactez TSL RESCUE.

Il est extrêmement important de :

- ne jamais partir en opération sans avoir vérifié au préalable l'état des éléments du portage et du brancard,
- demander conseil à un technicien TSL RESCUE ou renvoyer la pièce concernée en cas de défaillance,
- **surtout ne jamais procéder à des réparations par vos propres moyens.**






BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation


3/ Montage des bras de portage sur le brancard

1- Fixer les tubes arrière (peinture noire) sur les articulations arrière du brancard (repérées en noir).

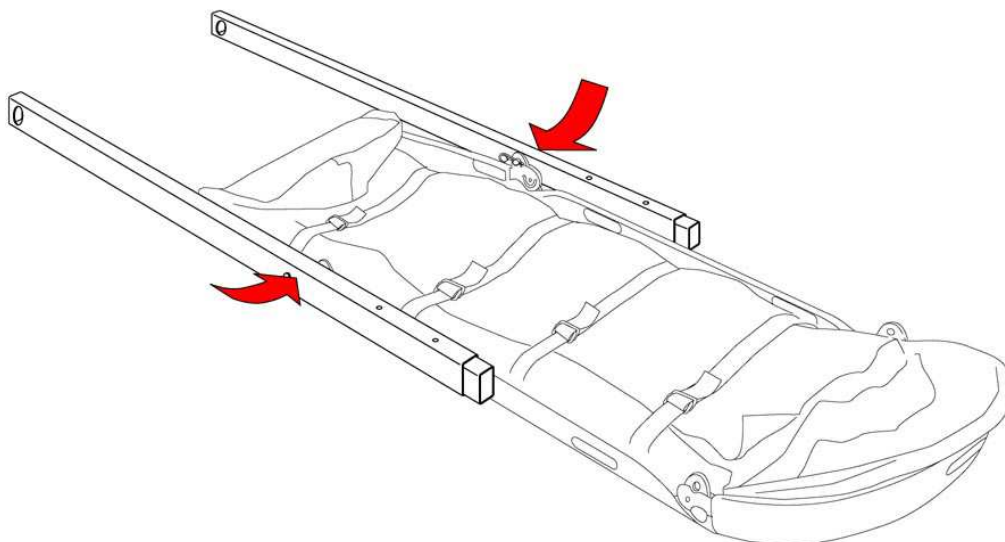

2- Mettre en position les goupilles pour verrouiller les bras.

3- Sortir les manchons jusqu'au verrouillage par les snaps.

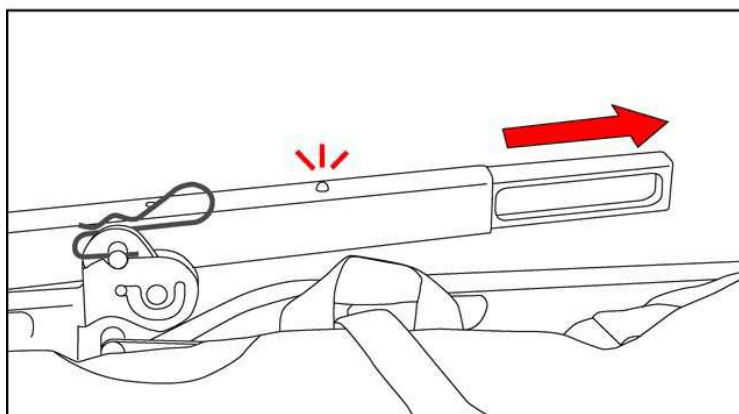





BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation

4- Insérer les tubes avant (peinture rouge) sur les manchons et verrouiller les goupilles sur les articulations avant du brancard (repérées en rouge).

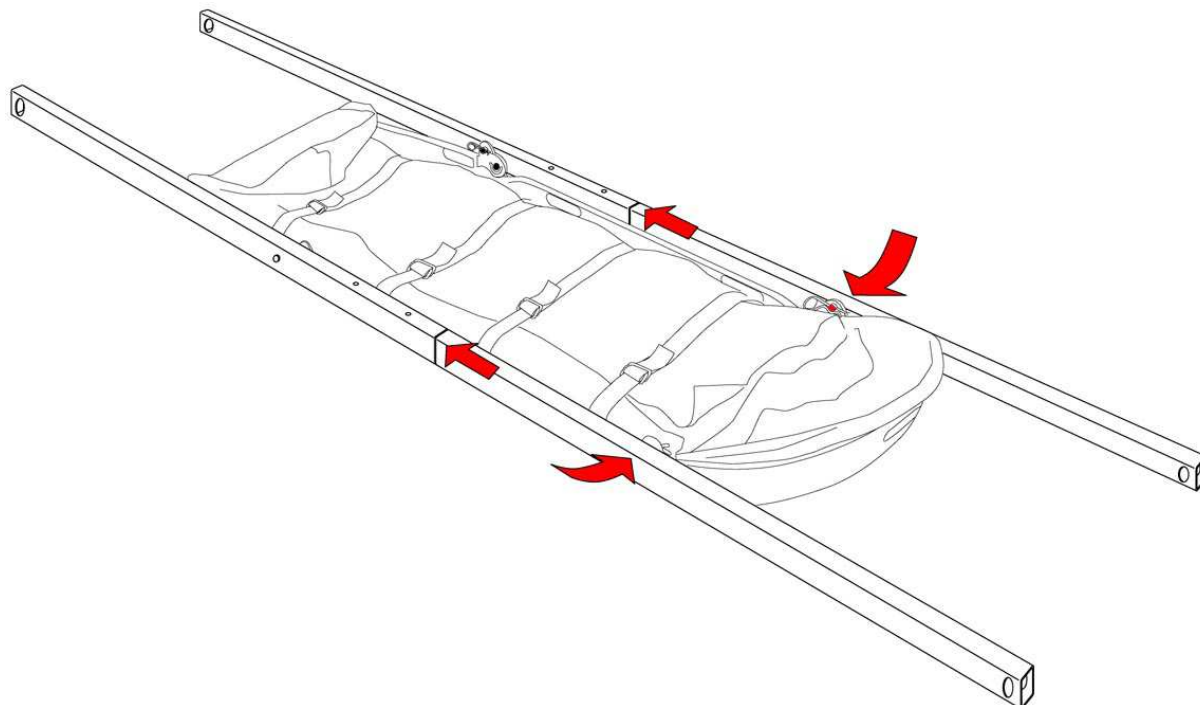

Il est important de bien s'assurer de la bonne mise en place des goupilles de verrouillage avant de commencer la descente.

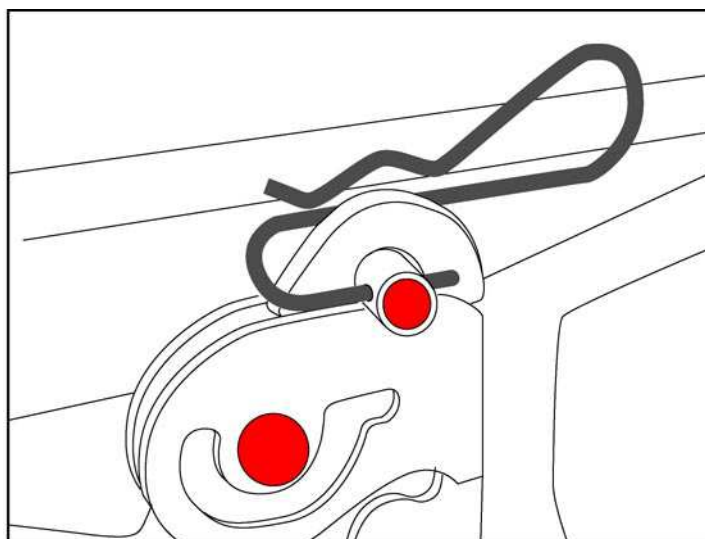





BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation

4/ Utilisation du portage:

Les deux porteurs doivent enfiler les harnais de portage.

Une fois les harnais bien réglés, les porteurs doivent insérer les bras de portage dans les boucles noires au niveau des hanches.

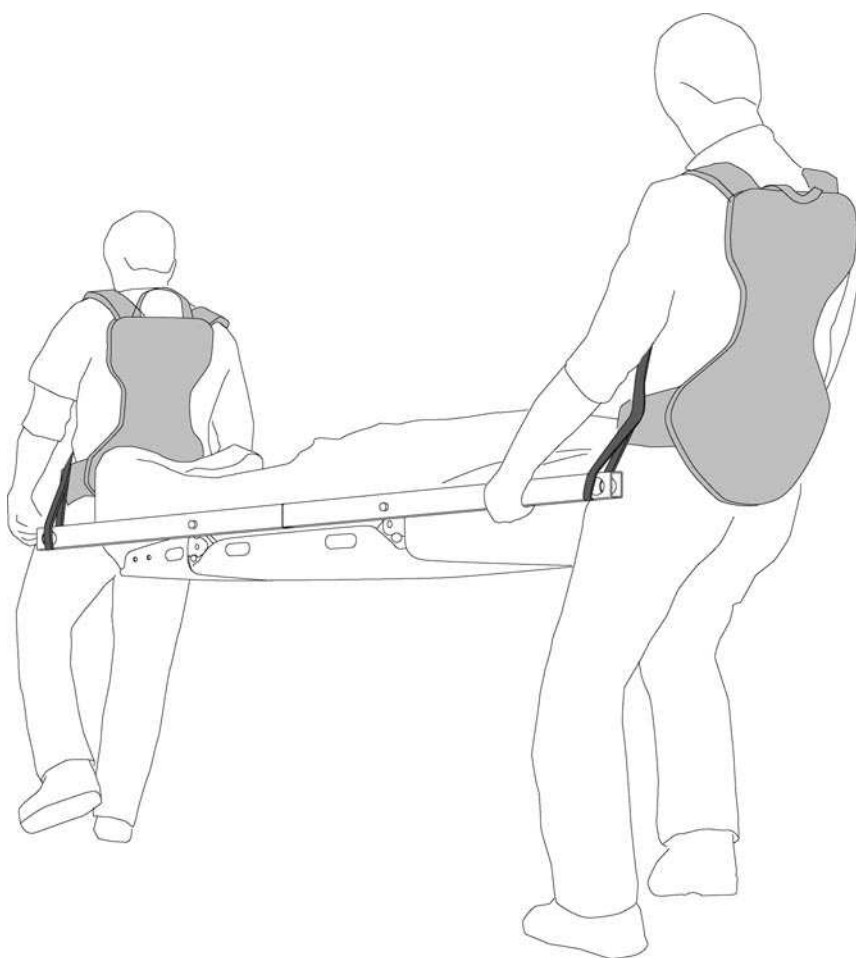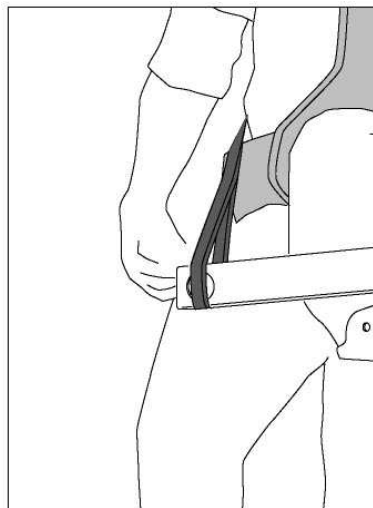



BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation

5/ Portage du brancard sur le dos :

Pour porter le brancard sur le dos, installez un des harnais de portage sur le brancard comme indiqué sur le schéma suivant.



- Passez les sangles latérales dans les poignées inférieures de la coque centrale.
- Serrez les sangles avec les anneaux en répartissant bien la tension entre la droite et la gauche.

Le brancard peut ainsi être porté comme un sac à dos, le harnais garantissant un portage ergonomique.





BRANCARD FRANCO GARDA SYSTEME DE PORTAGE

Manuel d'utilisation

6/ Contact :

En cas d'incompréhension ou de doute sur l'utilisation ou l'entretien du système de guidage à ski, TSL RESCUE se tient à votre disposition pour vous fournir toutes les informations nécessaires.

En cas de dysfonctionnement ou d'usure anormale du brancard, **ne procédez jamais à des réparations par vos propres moyens.**

Pour toute demande d'informations ou si votre matériel nécessite une réparation, adressez-vous exclusivement à :

TSL RESCUE

9, rue du Pré Faucon - PAE des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

Tel. : +33 04 50 02 80 29

Fax : +33 04 50 01 28 97

E-Mail : info@tslrescue.com

