



BRANCARD FRANCO GARDA
MONO-ROUE
Manuel d'utilisation

MU PFFG028 éd.02-2021



MONO-ROUE
MANUEL D'UTILISATION



TSL RESCUE – 9, rue du Pré Faucon – PAE les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX (France)
Tél : +33 (0)4 50 02 80 29 / Fax : +33 (0)4 50 01 28 97 Mail : info@tslrescue.com – www.tslrescue.com



BRANCARD FRANCO GARDA MONO-ROUE

Manuel d'utilisation

Avertissement :

Ce manuel d'utilisation concerne uniquement la mono-roue, adaptable sur le brancard Franco Garda.

Pour tout renseignement sur l'utilisation du brancard Franco Garda, reportez-vous à son mode d'emploi.

Lors de l'utilisation du brancard Franco Garda et de ses accessoires, la sécurité des secouristes et des patients dépend de la bonne utilisation qui en est faite.

Toutes les personnes l'utilisant doivent avoir auparavant pris connaissance du manuel d'utilisation et avoir effectué des exercices pratiques avant de partir en opération.

Lors de ces exercices, il est recommandé d'utiliser un mannequin.

Pour garantir le bon fonctionnement du brancard Franco Garda et de ses accessoires, respecter soigneusement les recommandations contenues dans le paragraphe « Maintenance ».

Il est extrêmement important de :

- Ne jamais partir en opération sans avoir vérifié au préalable l'état de la mono-roue et du brancard,
- Demander conseil à un technicien TSL RESCUE ou renvoyer la pièce concernée en cas de défaillance,





BRANCARD FRANCO GARDA MONO-ROUE


Manuel d'utilisation

1/ Présentation :

La mono-roue doit être utilisée avec le système de portage (PFFG031) ou (PFFG045). Elle se fixe sur les barres de portage et permet de soulager les efforts des porteurs. La mono-roue est composée d'un châssis tubulaire en aluminium, sur lequel quatre équerres de fixation coulissent. Pour l'attache de la mono-roue sur le brancard, ces équerres sont munies de crochets de fixation.

La roue utilisée est de grand diamètre, pour faciliter le transport même sur chemin très accidenté. Cette roue est fixée sur un bras oscillant, pour augmenter le confort du blessé.

Après que les équerres de fixations soient installées sur le châssis, la roue se met en place sous le brancard avec le blessé conditionné dans celui-ci.

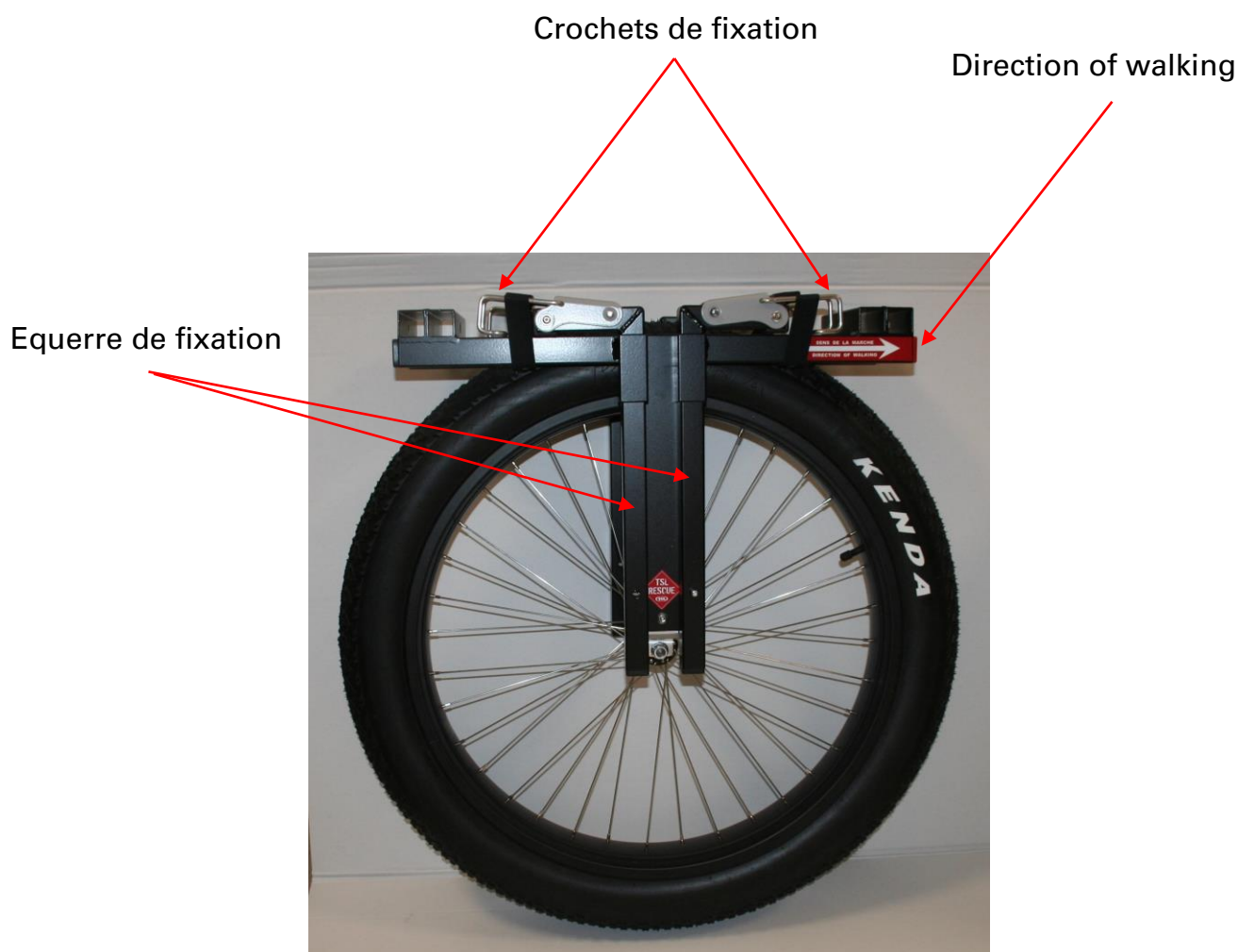




BRANCARD FRANCO GARDA MONO-ROUE


Manuel d'utilisation

2/ Montage de la mono-roue sur le brancard :

Les barres de portage doivent être installées sur le brancard avant de monter la mono-roue.

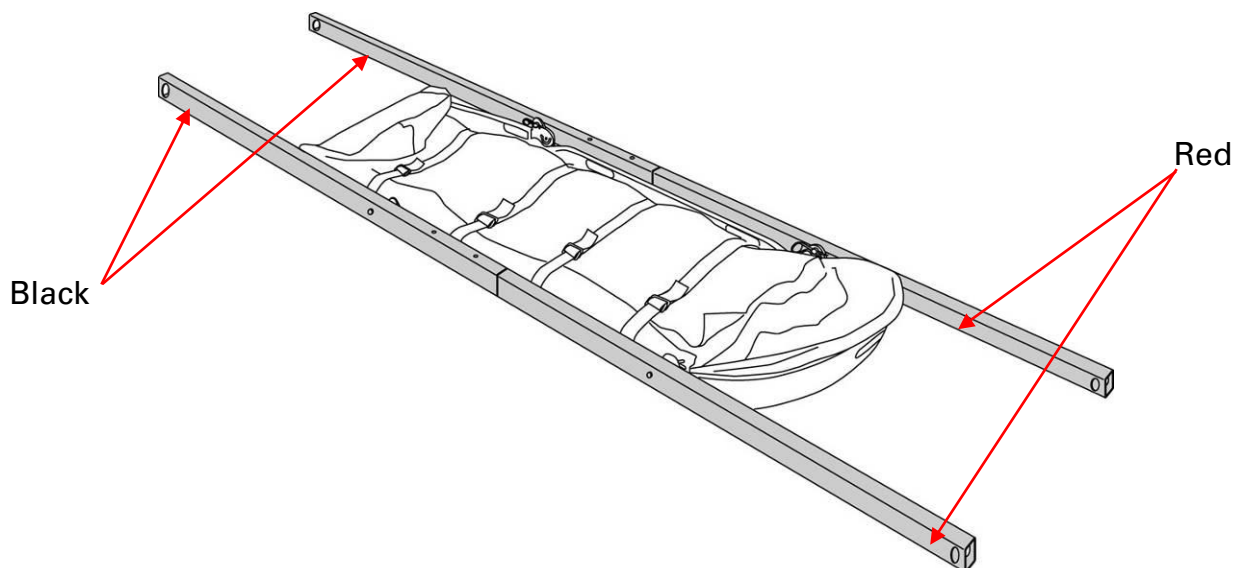

a) Ouvrir les boucles plastiques de blocage des équerres de fixation.

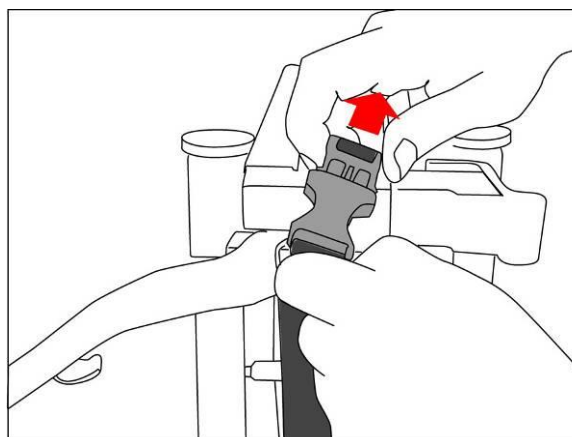



BRANCARD FRANCO GARDA MONO-ROUE Manuel d'utilisation

b) Déplier les équerres de fixation et les verrouiller à l'aide des boutons snaps.



c) Soulever doucement le brancard avec le patient jusqu'à ce que la roue passe sous ce dernier. Reposer le brancard sur la roue, puis verrouiller les crochets.





BRANCARD FRANCO GARDA MONO-ROUE

Manuel d'utilisation

3/ Utilisation :

Lors de l'utilisation, le sens de marche doit correspondre à celui indiqué sur le sticker.



Direction of walking

Attention : bien vérifier la pression du pneu avant l'utilisation. (0,5 bars)

4/ Contact :

Pour toute demande d'informations ou si votre matériel nécessite une réparation, adressez-vous exclusivement à :

TSL RESCUE

9, rue du Pré Faucon
PAE Les Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

Tél. : +33 (0)4 50 02 80 29
Fax : +33 (0)4 50 01 28 97
E-mail: info@tslrescue.com



TSL RESCUE – 9, rue du Pré Faucon – PAE les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX (France)
Tél : +33 (0)4 50 02 80 29 / Fax : +33 (0)4 50 01 28 97 Mail : info@tslrescue.com – www.tslrescue.com