



SPATULE ARRIERE FRANCO GARDA pour brancard modèle long

Mise en œuvre et recommandations

REAR SPATULA FRANCO GARDA for stretcher long model

Implementation and recommendations

18-03-2013

Spatule arrière souple permettant de faire glisser le brancard Franco Garda sur la neige en sens inverse, les pieds du blessé en avant.

Flexible rear spatula to slide the stretcher Franco Garda on snow in reverse position, the feet of the injured forward.



Poids / weight 430 g Dimension / size 44 cm x 29 cm



Montage simple et rapide / Quick and easy installation





SPATULE ARRIERE FRANCO GARDA pour brancard modèle long

Mise en œuvre et recommandations

REAR SPATULA FRANCO GARDA for stretcher long model

Implementation and recommendations

18-03-2013

IMPORTANT : NE PAS HELITREUILLER LE BRANCARD AVEC LA SPATULE / DO NOT HELICOPTER WINCH WITH THE SPATULA

- Montage de la spatule / Spatula installation
-


Détendre les 4 sangles / Untighten the 4 straps

Glisser la spatule sur la partie arrière du brancard Franco Garda / Slide the spatula on the back of the stretcher Franco Garda




Fixer les crochets latéraux (1) / Fasten the lateral hooks (1)

Attacher les boucles (2) / Attach the buckles

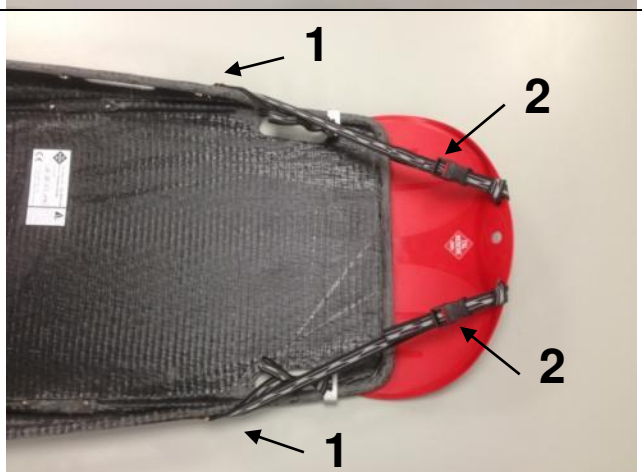

Tendre les 2 sangles avant pour relever la spatule (3) / Tighten the two front straps to lift the spatula (3).

Tendre les 2 sangles latérales pour empêcher la spatule de reculer (4) / Tighten the two side straps to keep the spatula to move backwards (4).

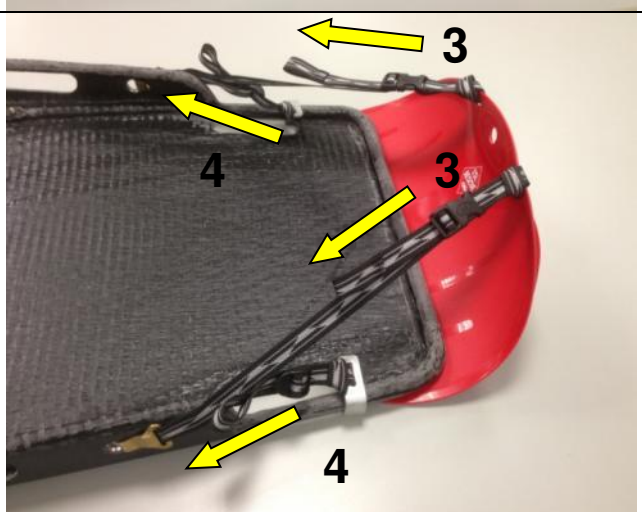

- Pour le démontage procéder en sens inverse du montage en commençant par détendre les 4 sangles / To remove proceed in reverse of the installation, starting with untighten the 4 straps.

